

Handleiding Connect Carrier



Kenmerken Connect Carrier

- Transportbak op wielen.
- CE-markering.
- Afmetingen bak: 56 cm breed, 80 cm lang en 35 cm hoog.
- Inhoud bak: 140 liter.
- Wioldruk 45 kg.
- Max. wielbreedte: 80 cm.
- Max. gewicht in bak: 50 kg.
- 2-wiel aangedreven (36 volt motoren met schijfremmen).
- Accu 13,6 Amp. (afneembaar).
- Actieradius 20 km.
- Ding dong bel.
- Fietscomputer.
- Stuurstabilisator (verstelbaar in weerstand).
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar.
- Levertijd: 30 werkdagen na ontvangst van de rolstoel bij Roam.
- Montage direct op afspraak is ook mogelijk.



ROAM Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

INLEIDING

Roam is, behalve fabrikant van de unieke en speciale "fietsen", voor zeer uiteenlopende doeleinden ook fabrikant van de Connect Carrier.

De Connect Carrier is een nieuw product van Roam. Een product dat voorziet in de wensen en behoeften van de gebruiker. Want zoals u weet denkt Roam met u mee om uw leefomstandigheden zo prettig en praktisch mogelijk in te vullen. Zelfstandigheid van de gebruiker staat bij Roam hoog in het vaandel.

De Connect Carrier is een transportbak op wielen die aan elke rolstoel kan worden gekoppeld en elektrisch wordt voortgedreven. Geen enkele inspanning hoeft te worden geleverd, want de elektrische aandrijving zorgt ervoor dat u geheel ontspannen en fit op uw bestemming aankomt. De mogelijkheden van de aangedreven transportbak zijn divers.

De aangedreven transportbak kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van kinderen, het doen van de boodschappen en niet te vergeten, het meenemen of uitlaten van uw trouwe viervoeter, ofwel de gezinshond of hondenhuisgenoot.

Roam is in 1987 opgericht door Theo de Rouw. Theo de Rouw startte op eigen initiatief in de avonduren. Zijn doelstelling was: de onafhankelijkheid van de beperkte mens. Deze doelstelling had tot gevolg dat drie jaar nadien de eenmanszaak uitgroeide tot een fulltime job.

Met steeds dezelfde doelstelling voor ogen werd in 1997 de onderneming omgezet in een V.O.F. en volgt samenwerking met Johanna de Rouw en later ook met Johan de Rouw. De doelstelling van het onafhankelijk zijn van de beperkte mens is door de jaren heen vastgehouden en blijft ook voor de toekomst voor Roam actueel.

Inmiddels heeft Roam 9 werknemers en is het bedrijf NEN-EN- ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat verzekert u ervan dat Roam op alle gebied kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.

In 2003 is Roam door de Kamer van Koophandel uitgeroepen tot de creatiefste ondernemer van het jaar (het certificaat hiervoor is uitgereikt door de Kamer van Koophandel).

Inmiddels geniet de Roam aanpak internationale erkenning.

Welkom bij het Roam-team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Roam Connect Carrier. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Connect Carrier rijklaar gemaakt. Het overhandigen van de gebruikershandleiding, inclusief de geboden en waarschuwingen heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de Connect Carrier dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, inclusief de geboden/ waarschuwingen dienen te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de waarschuwingen/geboden en het niet nakomen van de gebruikers-handleiding. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Connect Carrier beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding. Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Connect Carrier voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Connect Carrier is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw dealer of de fabrikant.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Connect Carrier.

ROAM Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

1 mei 2018

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Welkom bij het Roam-team 3

Inhoudsopgave 4

Controle van de levering 5

***Geboden en Waarschuwingen die dienen te worden
opgevolgd 6/7***

Aan- en afkoppelen 8

Remmen 8

Accu 8/9/10/11

Onderhoudsbeurten en uw vakman 11

Onderhoud Connect Carrier 12

Gereedschap 12

Checklist 13

Aanhaalmomenten 13

Garantie 14

Contact 14

Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transportschade wordt geconstateerd, geef dit dan door aan uw dealer. Roam vertrouwt erop dat de Connect Carrier aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel transportplezier.

Belangrijk

Bij aflevering van uw Connect Carrier zijn alle in dit boekje beschreven onderdelen goed en/of afgesteld op uw wensen. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. U kunt dit het best laten verzorgen door uw Roam-specialist. Voor diegenen die dat zelf kunnen en willen doen, is het boekje een belangrijk hulpmiddel. Wij raden u echter aan te allen tijde te overleggen met de Roam-dealer. Hij is niet alleen leverancier van uw Connect Carrier, maar ook een vakman die u van adviezen kan voorzien.

Geboden en Waarschuwingen

Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!

1. Bij aanschaf van de Connect Carrier dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing van de Connect Carrier.
2. De dealer/ gebruiker dient Roam te informeren over het gebruik van de Connect Carrier (vervoer kinderen/hond/boodschappen).
3. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik of onjuiste informatie voor de toepassing van de Connect Carrier en de hieruit voortvloeiende schade, onveilige situaties/handelingen, ongelukken of incidenten.
4. Voordat je gaat fietsen, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel deugdelijk vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze deugdelijk vast zitten.
5. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor gebruiker en passagiers van de Connect Carrier met betrekking tot het nemen van hellingen.
6. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen heet lopen en de motor kan overbelast raken zodat er defecten optreden.
7. Punt 6 geldt ook voor afdalingen.
8. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.
9. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (maximaal 10 km per uur) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
10. Pas uw snelheid aan, aan de omstandigheden. Denk aan verkeersdruk, slechte wegen, obstakels (drempels) en wegen langs waterpartijen.
11. Hou uw handen aan het stuur en laat u niet afleiden.
12. De Connect Carrier is persoonsgebonden. Alleen de rolstoeler/gebruiker/ volwassene is toegestaan de Connect Carrier te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
13. Het is verboden dat onbevoegden de Connect Carrier gebruiken.
14. Het is verboden om de Connect Carrier te gebruiken onder invloed van alcohol drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
15. Houd u aan de Fietswet welke geldt in Nederland.
16. Houd u aan de Fietswet die geldt in het buitenland (www.Fietsbond.nl) en past u aan, aan de omstandigheden.
11. Neem obstakels in het wegdek (drempels) met gepaste snelheid.
12. Zorg dat u goed bent uitgerust (mobiele telefoon).
13. Vermeld het nummer van uw dealer in uw mobiele telefoon.
14. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
15. Bij gebruik van de Connect Carrier in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd. Rolstoelers dragen een signaleringshesje.
16. Bescherm uzelf en kinderen/hond bij langere ritten tegen weersomstandigheden.
17. Bij langere ritten met de hond, zorg voor vers drinkwater en zet de hond vast zoals in de handleiding is beschreven (koppeling aan de oogbout in de bodemplaat en een korte lijn (tegen uitspringen)).
18. Het vervoer van kinderen/hond mag alleen plaatsvinden onder

- begeleiding van de volwassen gebruiker (rolstoelende ouder / verzorger).
19. Het maximale draaggewicht van de Connect Carrier is maximaal 50 kg. Dit draaggewicht mag nooit worden overschreden.
 20. Het maximale aantal kinderen dat in de Connect Carrier vervoerd mag worden bedraagt 2, met een maximaal gewicht van 50 kg.
 21. Van 0 tot 1,5 jaar wordt de Maxi Cosi gemonteerd door Roam op de Easyfix.
 22. Kinderen dienen plaats te nemen op het zitbankje, dat in de Connect Carrier aanwezig is. Het is verboden om kinderen staand te vervoeren.
 23. Zie toe dat kinderhandjes en overige lichaamsdelen van kinderen binnen de bak blijven; spaakafscherming is verplicht.
 24. Kinderen van bovenvermelde leeftijd dienen een veiligheidshelm te dragen.
 25. Kinderen dienen een 3/5 punts gordel te dragen. Zonder het gebruik van een 3/5 punts gordel mogen kinderen niet worden vervoerd.
 26. Het in- en uitstappen in de Connect Carrier door kinderen dient onder begeleiding van de ouder/verzorger plaats te vinden.
 27. Denk bij het in- en uitstappen dat kinderen niet achter de gordels blijven haken.
 28. Kinderen beneden de 1,5 jaar met een gewicht minder dan 13 kg mogen alleen in de Connect Carrier worden vervoerd wanneer er een kinderzitje Maxi-Cosi Easyfix aanwezig is in de vervoerbak.
 29. Het is verboden een hond in de Connect Carrier te vervoeren, zonder vastkoppeling aan de oogbout in de bodemplaat. De lijn (hondenriem) dient kort te zijn, zodat de hond niet uit de Connect Carrier kan springen.
 30. Het is verboden om boodschappen te vervoeren die boven de bovenrand van de Connect Carrier uitkomen.
 31. Het is verboden om goederen te vervoeren die de bak in lengte en breedte overschrijden
 32. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Carrier worden aangebracht.
 33. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Carrier is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
 34. Voor een goede zichtbaarheid van de Connect Carrier, voer een vlag.
 34. Voor de Connect Carrier is een W.A. verzekering verplicht.
 35. Volg de voorwaarden van uw W.A. verzekering, inclusief de beveiligingsvoorwaarden (slotbeveiliging).

Aan- en afkoppelen van de Connect Carrier

AANKOPPELEN

Het aankoppelen van de Connect Carrier onder uw rolstoel gaat zeer eenvoudig: U zet allereerst de rolstoel op de rem, dan zet u de hendel van de connector op de Carrier dicht (omlaag), en schuif nu de Connect Carrier met het lagerhouder zover mogelijk in de adapter van uw rolstoel.

Nu moet u de hendel van de connector op de Connect Carrier openen (omhoog), zodat de beugel over het lipje van de adapter valt, daarna zet u de handel weer dicht. Nu is de Connect Carrier aangekoppeld.

Zet de rolstoel van de rem en u kunt gaan rijden.

AFKOPPELEN

Het afkoppelen van de Connect Carrier gaat ook heel eenvoudig, zet eerst de rolstoel op de rem, dan moet u de Connect Carrier tegenhouden, bij voorkeur op het stuur, daarna met uw andere hand de connector openen en de beugel van de klem omhoog houden. Nu kunt u de hendel van de connector weer dicht doen zodat de beugel op het lipje komt te liggen. Vervolgens de Connect Carrier langzaam uit de adapter schuiven en wegzetten.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl

Remmen

Het is van vitaal belang dat u de werking van het remsysteem van uw Connect Carrier volledig begrijpt. Indien het remsysteem niet op de juiste wijze gebruikt wordt, kan dit tot gevolg hebben dat u de macht over het stuur verliest of kan het leiden tot ernstige gevolgen(ongeluk, ernstige verwondingen).

De Connect Carrier is uitgerust met schijfremmen. Door de dubbele werking van de schijfremmen heeft de Connect Carrier een kortere remweg.

In een aantal gevallen kan, indien de handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor gebruiker en passagiers van de Connect Carrier met betrekking tot het nemen van hellingen. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen heet lopen en niet werken. Laatstgenoemd geldt ook voor het nemen van afdalingen met een hellingpercentage van 5% en hoger.

Wanneer de remmen naar het oordeel van gebruiker niet naar behoren functioneren, dient **direct** contact worden opgenomen met de dealer. De dealer dient eventuele defecten op te lossen. Het is verboden om de Connect Carrier te gebruiken bij het niet werken van het remsysteem in wat voor vorm dan ook.

Let op: schijfremmen kunnen heet worden; neem direct contact op met de dealer indien twijfel of niet juiste werking bestaat bij het functioneren van de remmen.

Kom niet in aanraking met de schijfremmen, constructie of behuizing.

Accu

ACCU EN OPLADER INSTRUCTIES:

1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voordat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren).
2. Laat de accu **nooit** aangeschakeld achter op uw fiets omdat de accu dan langzaam ontladen wordt en uiteindelijk hierdoor kapot kan gaan.

3. Sluit eerst de acculader aan op de accu voordat u de acculader aansluit op een wandcontactdoos.
4. Een oranje/rood lampje op de lader wil zeggen dat de accu geladen wordt. Een groen lampje wil zeggen dat de accu geladen is of niet geladen wordt. De lader stopt vanzelf met laden als de accu op de juiste spanning is geladen. U kunt de lader uitschakelen als het groene lampje brandt door de stekker uit het stopcontact te halen.
5. Als de accu vol is, koppel deze dan los van de netspanning.
6. Er kan een blauwe vonk zichtbaar zijn wanneer de accu op de controller wordt aangesloten. Dit is niet schadelijk en kan voorkomen worden door de accu (schakelaar) eerst uit te schakelen en dan pas de accu aan te sluiten op de controller.
7. Zorg voor een koele, droge veilige en goed geventileerde plaats wanneer u de accu oplaadt (nooit onder 0 graden Celsius laden)
8. Het laden van de accu duurt 7 uur wanneer de accu helemaal leeg is.
9. Door het vierkante witte knopje in te drukken kunt U zien hoe vol de accu is. 2

Stap 1; de stekker van het laadapparaat in de accu steken. 3

Stap 2; De stekker van het laadapparaat in het stopcontact steken.

Stap 3; De schakelaar op de accu aan zetten. Het rode lampje gaat dan branden. 4

Het laadapparaat afkoppelen;

Stap 1; Zet de schakelaar op de accu uit. Het rode lampje gaat dan uit.

Stap 2; Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Stap 3; Verwijder de stekker van het laadapparaat uit de accu.

HOE SCHAKELT U DE ELEKTROMOTORONDERSTEUNING IN:

1. Zet de schakelaar van de accu aan.
2. De LED's/rode lampjes op het display zullen nu oplichten.
3. Druk op het display op het "+" knopje zodat het eerste LED gaat knipperen (stand 1). Zodra u gaat fietsen zal de motor gaan helpen. U kunt **de snelheid en kracht** van uw motor beïnvloeden door op de "+" of "-" van het display te drukken. Er zijn **6 standen**. Stand 1/3/5 knipperen, stand 2/4/6 branden de LED's/rode lampjes. Start 'n Go: Door bij stilstand op het knopje "6km/u" te drukken zal de fiets direct gaan rijden tot een maximum van 6km/u. Zodra u het knopje loslaat zal de motor direct stoppen met aandrijven. Deze functie is bijzonder handig als u bijvoorbeeld in een hogere versnelling, of op een heuvel bent gestopt. De motor zal u dan direct doen laten rijden ook wanneer u niet trapt.
4. Let erop dat wanneer u gaat remmen u **eerst** stopt met trappen. Als u blijft trappen tijdens het remmen zal de motor blijven werken. De motor raakt dan overbelast en kan hierdoor defect raken. De motor zal bij het stoppen met trappen na ongeveer 1,5 seconde stoppen met werken.
5. Als u klaar bent met fietsen, schakel dan het systeem met de accu uit. Indien u de accu aan laat staan, zullen de lampjes op het display gaan knipperen en zal de accu verder leeglopen (met eventueel schadelijke gevolgen).

TIPS VOOR EEN LEVEN LANG GENIETEN VAN UW ELEKTROMOTOR ONDERSTEUNING

Wel doen:

1. Bij vochtige weersomstandigheden, bestaat de kans bij het niet goed beschermen van de stekkers en bedrading hetzij door kortsluiting hetzij door water het systeem kan worden beschadigd. Accelereer met beleid en geleidelijk. Vermijd maximale trapondersteuning bij lage snelheid omdat dit een hoge belasting op uw controller en accu geeft en dit zorgt voor versnelde ontlading van uw accu en daarmee een verlaging van uw actieradius en levensduur van de componenten.
2. Als u klaar bent met uw fietsrit, laadt dan direct de accu weer op.
3. Accuverzorging: Elke accu slijt met de tijd, ook als deze niet gebruikt wordt. Zorg er daarom voor dat uw accu altijd 50-75% lading heeft. Uiteraard, als u regelmatig fietst kan het geen kwaad om de accu gewoon vol te laden totdat u deze weer gebruikt. Let hierbij wel op dat uw accu elke maand een uur aan de lader wordt gezet om schadelijke diepte ontlading te voorkomen.

Niet doen:

1. Accu altijd aan de lader laden staan (versnelde slijtage van uw accu).
2. Overbelasten van de motor door gelijktijdig te remmen en te trappen.
3. Overbelasten van de motor door deze in heuvelachtig gebied te gebruiken of de motor langere tijd zwaarder te belasten.
4. Uw systeem aan laten staan wanneer u deze niet gebruikt.
5. Fiets parkeren/stallen op een lege of bijna lege accu.
6. Fiets parkeren/stallen met het contact nog aan.
7. Accu blootstellen aan vocht of te lage (<0C) of hoge (>40 C) temperaturen.
8. Accu laden bij temperaturen lager dan het vriespunt. Accu laten vallen i.v.m.. mogelijke beschadiging aan de cellen in de accu.
9. De elektro-onderdelen te **nat laten worden**(een normale regenbui is geen probleem).

Indien de fiets altijd buiten staat en/of veel water moet doorstaan, probeer dan de onderdelen zo goed mogelijk af te schermen voor de regen, zoals stekkers en motor, display, controller en accu (Tip: gebruik een hoes voor de fiets, bijv. voor scooters/ bakfietsen).

GARANTIEPERIODE:

U heeft 12 maanden garantie op uw elektromotorondersteuning.

Onderhoudsbeurten en uw vakman

Vitale delen zoals kabels, spaken en remmen krijgen in de aanloopperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, is een grote jaarbeurt noodzakelijk. Uw vakman heeft niet alleen het gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren, maar zijn handen, ogen en oren zijn eveneens in staat om kleine onvolkomenheden tijdig te bespeuren. Vóór het invallen van de winter of vóór een vakantietrektocht, adviseren wij u de fiets na te laten kijken. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Leest u deze garantiebepalingen verderop in dit boekje aandachtig door!

Onderhoud Connect Carrier

1. De Connect Carrier schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Connect Carrier schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Connect Carrier niet afsprengen met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Connect Carrier.
5. Aluminium en chroomdelen insmeren met een zuurvrije vaseline of speciaal vet (vraag uw dealer).
6. De Connect Carrier droog opslaan.

Gereedschap

Voor de bescheiden werkzaamheden volstaat een eenvoudige set gereedschap. U bent al een flink stuk op weg met een setje steek- of dopsleutels (8 t/m 15), inbussleutels, schroevendraaier, combinatietang, een busje rijwielolie en uiteraard een banden-reparatieset. Zorgt u er bij vervanging in ieder geval voor dat originele of gelijkwaardige onderdelen worden gemonteerd voor een betere werking en omdat in sommige gevallen anders de garantie vervalt.

Vraag uw Roam-dealer om advies!

Checklist

Regelmatig controleren:

1. Werken de remmen naar behoren?
2. Staat stuurpen niet hoger dan de veiligheidsmarkering aangeeft?
3. Zitten alle bouten en moeren goed vast?
4. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
5. Zijn de banden op spanning (banden druk staat op de zijkant van de band)?
6. Zit de stuurpen en stuurbocht goed vast?
7. Werkt de verlichting naar behoren en zijn de batterijtjes van het standlicht niet aan vervanging toe?
8. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
9. Zitten de handvaten nog goed vast?
10. Zijn de reflectoren van de pedalen vrij van vuil en zijn de pedalen nog voldoende stroef?
11. Werkt de snelsluiting naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).
12. Werken de 3/5 punts gordels juist?

Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.

Aanhaalmomenten

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*

Garantie

Roam geeft 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage. Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of verkeerd gebruik.

Contact

Roam Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.: 073-599 7042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl