

Handleiding Follow One met Zitje



Kenmerken Follow One met Zitje

Maak van uw Rider met Zitje een Follow One

- Volgiets voor de valide fietser.
- Zeer eenvoudig aan- en afkoppelbaar d.m.v. een uitgekiende en bedrijfszekere verbinding.
- Achter iedere fiets mogelijk.
- Het totale gewicht achter de fiets (Follow One met Zitje) is ca. 125 kg.
- Breedte Follow One met Zitje 75 cm.
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar.
- Levertijd: 30 werkdagen.

ROAM Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

INLEIDING

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat. De Roam Follow One met Zitje kan aan elke fiets worden gekoppeld en is een vervoermiddel voor de valide fietser.

Roam is in 1987 opgericht door Theo de Rouw, die op eigen initiatief - in de avonduren - startte met ondernemen. Zijn doelstelling was: de onafhankelijkheid van de beperkte mens. Deze doelstelling had tot gevolg dat drie jaar nadien de eenmanszaak uitgroeide tot een fulltime job.

Met steeds dezelfde doelstelling voor ogen werd in 1997 de onderneming omgezet in een V.O.F. en volgt samenwerking met Johanna de Rouw en later ook met Johan de Rouw. De doelstelling van het onafhankelijk zijn van de beperkte mens is door de jaren heen vastgehouden en blijft ook voor de toekomst voor Roam actueel.

Inmiddels wordt de directie gevoerd door Johan de Rouw en heeft Roam 9 werknemers. Het bedrijf is al jarenlang NEN-EN- ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat verzekert u ervan dat Roam op alle gebied kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.

In 2003 is Roam door de Kamer van Koophandel uitgeroepen tot de creatiefste ondernemer van het jaar (het certificaat hiervoor is uitgereikt door de Kamer van Koophandel).
Inmiddels geniet de Roam aanpak internationale erkenning.

Welkom bij het Roam-team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Follow One met Zitje. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Follow One met Zitje rijklaar gemaakt. Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de Follow One met Zitje dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikers-handleiding. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Follow One met Zitje beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding.

Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Follow One met Zitje voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Follow One met Zitje is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw dealer of de fabrikant.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Follow One met Zitje.

ROAM Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

1 mei 2018

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Welkom bij het Roam Team 3

Inhoudsopgave 4

Controle en Levering 5

Geboden en waarschuwingen 6

Afstellen van de zitpositie 7

Aan en afkoppelen van de Follow One 8

Remmen 9

Onderhoudsbeurten en uw vakman 10

Onderhoud 10

Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist 10

Checklist 11

Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/

Roam Specialist 11

Garantie 12

Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transportschade wordt geconstateerd, geef dit dan door aan uw dealer. Roam vertrouwt erop dat de Follow One met Zitje aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel fietsplezier.

Belangrijk

Bij aflevering van uw Follow One met Zitje zijn alle op de bijgeleverde CD beschreven onderdelen goed en/of afgesteld op uw wensen. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. U kunt dit het best laten verzorgen door uw dealer/Roam-Specialist. Maak hiervoor een afspraak bij uw dealer.



De fietser dient rekening te houden met de breedte van het wegdek. Let dus op bij het nemen van bochten en eventueel paaltjes die zich in het wegdek bevinden. Bij twijfel stopt de fietser en loopt naast de fiets door de bocht en tussen de paaltjes van het wegdek door. De breedte van de fiets is 75 cm. Het totale gewicht achter de fiets (Follow One met Zitje) is mag niet meer bedragen dan 125 kg.

Geboden en Waarschuwingen

Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!

1. Bij aanschaf van de Follow One met Zitje dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. De bestuurder van de Follow One met Zitje dient in een zodanig geestelijk en fysiek goede gezondheid te verkeren dat het gebruik van de Follow One met Zitje geen gevaar kan opleveren voor de bestuurder zelf en/of voor derden. De bestuurder dient niet te worden beperkt in een zittende positie.
4. De bestuurder dient de pedalen van de Follow One met Zitje goed te kunnen bedienen.
5. Het gehoor- en gezichtsvermogen van de bestuurder dient geschikt te zijn voor het gebruik van de Follow One met Zitje.
6. Gebruiker dient de handleiding goed te lezen en begrijpen.
7. Indien gebruiker zodanig beperkt is dat hij/zij gezichts-/gehoorproblemen heeft en/of de handleiding niet kan lezen en begrijpen, zijn ouders/verzorgers/begeleiders verantwoordelijk voor de toepassing van de handleiding en het gebruik van de Follow one met Zitje door eindgebruiker.
8. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.
9. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (maximaal 10 km per uur) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
10. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor de gebruiker met betrekking tot het nemen van hellingen.
11. Hellingen van 5% of meer mogen niet worden genomen.
12. Afdalingen van 5% of meer mogen ook niet worden genomen. De remmen kunnen heet worden en de motor kan overbelast raken; zodoende kunnen er defecten optreden.
13. Pas uw snelheid aan, aan de omstandigheden. Denk aan drukke wegen, slechte wegen, obstakels en wegen langs waterpartijen.
14. Voor schakelen tijdens het rijden, dient men de trappers stil te houden.
15. Hou uw handen aan het stuur en laat u niet afleiden.
16. Let op dat de rolstoel juist wordt bevestigd op de aanhanger en wordt vastgemaakt met de bevestigingsgordels.
17. De fietser dient rekening te houden met de breedte van het wegdek. Let dus op bij het nemen van bochten en eventueel paaltjes die zich in het wegdek bevinden. Bij twijfel stopt de fietser en loopt naast de fiets door de bocht en tussen de paaltjes van het wegdek door.

18. De Follow One met Zitje is persoonsgebonden. Het is verboden dat onbevoegden de Follow One met Zitje gebruiken. Alleen de eigenaar/gebruiker is toegestaan de Follow One met Zitje te gebruiken.
19. Het totale gewicht achter de fiets (Follow One met Zitje + rolstoel) mag niet meer bedragen dan 125 kg.
20. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
21. Het is verboden om de Follow One met Zitje te gebruiken onder invloed van alcohol/drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
22. Houd u aan de Fietswet welke geldt in Nederland (www.Fietsbond.nl).
23. Houd u aan de Fietswet die geldt in het buitenland (www.Fietsbond.nl) en pas u aan, aan de omstandigheden.
24. Zorg bij het fietsen dat u goed bent uitgerust (mobiele telefoon).
25. Vermeld het nummer van uw dealer in uw mobiele telefoon.
26. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
27. Bij gebruik van de Follow One met Zitje in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
28. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
29. De handen van de fietser dienen tijdens het fietsen op het stuur te blijven.
30. Fietsers dragen een signaleringsvestje.
31. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de dealer/ Roam specialist. De Roamspecialist als ook de dealer zijn verplicht de handleiding op te volgen en de aanbevolen gereedschappen toe te passen.
32. Er mogen geen wijzigingen aan de Follow One met Zitje worden aangebracht.
33. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Follow One met Zitje is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
34. Controleer voordat u gaat fietsen altijd de remmen (de fietser).
35. De bagagedrager van de fiets blijft vrij.

Afstellen zitpositie

Zorg er altijd voor dat de zitpositie correct is afgesteld voordat u gaat fietsen. Verzoek de dealer om de zitpositie ten opzichte van het zadel en het stuur juist af te stellen.

Mocht u de zitpositie zelf willen afstellen, dan adviseren wij u uw benen in lichtgebogen positie te hebben, met de trappers in de verst mogelijke stand ten opzichte van het zitje.

Aan- en afkoppelen van de Follow One met Zitje

AANKOPPELEN

Het aankoppelen van de Follow One met Zitje aan uw fiets gaat zeer eenvoudig. U zet allereerst de Follow One op de rem; daarna schuift u de aankoppelstang in de adapterknop die voor aan de rider is bevestigd. Nu moet u de handel op de Follow one dicht (omlaag) doen. De aankoppelstang is nu bevestigd.

Zet nu de fiets voor de Follow One met Zitje, zodat de koppelstang verbonden kan worden aan de fiets.

Duw de koppelstang over de kogelkoppeling zodat de beugel vergrendelt (u hoort nu een klik). De ketting met de harpsluiting dient in het gaatje te worden vastgezet (als extra beveiliging) zie foto 1.

De follow one is nu gereed om mee te gaan rijden.



foto 1

AFKOPPELEN

Het afkoppelen van de Follow One met Zitje gaat ook heel eenvoudig.

De ketting met harpsluiting die als eerste losgehaald te worden.

De hevel van de koppeling kunt u naar voren halen zodat u de koppelstang er af kunt halen.

De aankoppelstang kan nu worden losgekoppeld van de Follow One met Zitje; dit doet u door de snelsluiting op de connector los te halen en de koppelstang uit de adapter te schuiven.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl

Remmen

Het is van vitaal belang dat u de werking van de remmen van uw Follow One met Zitje volledig begrijpt. Indien de remmen niet op de juiste wijze gebruikt worden, kan dit tot schade en ongelukken leiden.

Wanneer de remmen naar het oordeel van gebruiker niet naar behoren functioneren, dient **direct** contact te worden opgenomen met de dealer. De dealer dient eventuele defecten op te lossen. Het is verboden om de Follow One met Zitje te gebruiken bij het niet werken van het remsysteem in wat voor vorm dan ook.

Let op:

1. Controleer voordat u gaat fietsen altijd de remmen van uw fiets (de fietser).
2. Controleer of de Follow One met Zitje correct en deugdelijk is aangekoppeld.

GARANTIEPERIODE:

U heeft op de onderdelen 1 jaar garantie en 5 jaar op het frame

Onderhoudsbeurten en uw vakman

Vitale delen zoals kabels, spaken en remmen krijgen in de aanloopperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, is een grote jaarbeurt noodzakelijk. Uw vakman heeft niet alleen het gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren, maar zijn handen, ogen en oren zijn eveneens in staat om kleine onvolkomenheden tijdig te bespeuren. Vóór het invallen van de winter of vóór een vakantietrektocht, adviseren wij u de fiets na te laten kijken. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw dealer.

Onderhoud Follow One met Zitje

1. De Follow One met Zitje schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Follow One met Zitje schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Follow One met Zitje niet afsputten met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Follow One met Zitje.
5. Aluminium en chroomdelen insmeren met een zuurvrije vaseline of speciaal vet (vraag uw dealer).
6. De Follow One met Zitje droog opslaan.

Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist

Voor de bescheiden werkzaamheden volstaat een eenvoudige set gereedschap. U bent al een flink stuk op weg met een setje steek- of dopsleutels (8 t/m 15), inbussleutels, schroevendraaier, combinatietang, een busje rijwielolie en uiteraard een banden-reparatieset. Zorgt u er bij vervanging in ieder geval voor dat originele of gelijkwaardige onderdelen worden gemonteerd voor een betere werking en omdat in sommige gevallen anders de garantie vervalft. Vraag uw Roam-dealer om advies!

Checklist

Regelmatig controleren:

1. Werken de remmen naar behoren?
2. Staat stuurpen niet hoger dan de veiligheidsmarkering aangeeft?
3. Werken de veiligheidsgordels naar behoren?
4. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
5. Zijn de banden op spanning (banden druk staat op de zijkant van de band)?
6. Zit de stuurpen en stuurbocht goed vast?
7. Werkt de standaard naar behoren?
8. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
9. Zitten de handvaten nog goed vast?
10. Werken de snelsluitingen naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).

Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.

Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/Roam Specialist

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*

Garantie

Roam geeft 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage. Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

Contact

Roam Special Cycles B.V.
Haarstraat 19b
5324 AM Ammerzoden
Tel.: 073-599 7042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl