

## Handleiding Connect Kid Maxi Cosi



### Kenmerken Connect Kid Maxi Cosi

- Uiterst eenvoudig aan- en afkoppelbaar d.m.v. een uitgekiende en bedrijfszekere verbinding.
- CE-markering.
- Bij vouwrolstoel: adapter altijd afneembaar.
- Aankoppelstang vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal. Gewicht: 2 kg.
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar.
- Levertijd: 5 werkdagen na ontvangst van de rolstoel bij Roam.
- Montage direct op afspraak is ook mogelijk.



ROAM Special Cycles B.V.  
Haarstraat 19b  
5324 AM Ammerzoden  
Tel.nr. 073-5997042  
E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl) Internet:  
[www.roam.nl](http://www.roam.nl)

## **INLEIDING**

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat.

De Roam Connect Kid Maxi Cosi is de ideale oplossing voor het aankoppelen van de Maxi Cosi op het Off road Wiel.

Roam is in 1987 opgericht door Theo de Rouw, die op eigen initiatief - in de avonduren - startte met ondernemen. Zijn doelstelling was: de onafhankelijkheid van de beperkte mens. Deze doelstelling had tot gevolg dat drie jaar nadien de eenmanszaak uitgroeide tot een fulltime job.

Met steeds dezelfde doelstelling voor ogen werd in 1997 de onderneming omgezet in een V.O.F. en volgt samenwerking met Johanna de Rouw en later ook met Johan de Rouw. De doelstelling van het onafhankelijk zijn van de beperkte mens is door de jaren heen vastgehouden en blijft ook voor de toekomst voor Roam actueel.

Inmiddels wordt de directie gevoerd door Johan de Rouw en heeft Roam 9 werknemers. Het bedrijf is al jarenlang NEN-EN- ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat verzekert u ervan dat Roam op alle gebied kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.

In 2003 is Roam door de Kamer van Koophandel uitgeroepen tot de creatiefste ondernemer van het jaar (het certificaat hiervoor is uitgereikt door de Kamer van Koophandel).

Inmiddels geniet de Roam aanpak internationale erkenning.

## **Welkom bij het Roam-team**

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Connect Kid Maxi Cosi. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Connect Kid Maxi Cosi rijklaar gemaakt.

Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikers-handleiding.

Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Connect Kid Maxi Cosi beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding.

Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Connect Kid Maxi Cosi voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Connect Kid Maxi Cosi is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw dealer of de fabrikant.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Connect Kid Maxi Cosi.

ROAM Special Cycles B.V.  
Haarstraat 19b  
5324 AM Ammerzoden  
Tel.nr. 073-5997042  
E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)  
Internet: [www.roam.nl](http://www.roam.nl)

1 mei 2018

## **Inhoudsopgave**

***Inleiding 2***

***Welkom bij het Roam Team 3***

***Inhoudsopgave 4***

***Controle en Levering 5***

***Geboden en waarschuwingen 6***

***Aan en afkoppelen van de Maxi Cosi 7***

***Onderhoudsbeurten en uw vakman 8***

***Onderhoud 8***

***Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist 8***

***Checklist 9***

***Aanhaalmomenten 9***

***Garantie 10***

### **Controle van de levering**

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transport-schade wordt geconstateerd, geef dit dan door aan uw dealer. Roam vertrouwt erop dat de Connect Kid Maxi Cosi aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel fietsplezier.

### **Belangrijk**

*Bij aflevering van uw Connect Kid Maxi Cosi zijn alle op de bijgeleverde CD beschreven onderdelen goed en/of afgesteld op uw wensen. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. U kunt dit het best laten verzorgen door uw dealer/Roam-Specialist. Maak hiervoor een afspraak bij uw dealer.*



***Koppel de Connect Maxi Cosi nooit aan of af op het Connect Offroadwiel met het kind in de Maxi Cosi***

***De gordel in de Maxi Cosi dient altijd vast te zijn, wanneer het kind zich in de Maxi Cosi bevindt, bevindt of bij het rijden.***

## **Geboden en Waarschuwingen**

**Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!**

1. Bij aanschaf van de Connect Kid Maxi Cosi dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. De gebruiker van de Connect Kid Maxi Cosi dient in een geestelijk goede gezondheid te verkeren en fysiek niet te worden beperkt in een zittende positie.
4. Het gehoor- en gezichtsvermogen van de gebruiker dient geschikt te zijn voor het gebruik van de Connect Kid Maxi Cosi.
5. Gebruiker dient de handleiding goed te lezen en begrijpen.
6. Indien gebruiker zodanig beperkt is dat hij/zij gezichts-/gehoorproblemen heeft en/of de handleiding niet kan lezen en begrijpen, zijn ouders/verzorgers/begeleiders verantwoordelijk voor de toepassing van de handleiding en het gebruik van de Connect Kid Maxi Cosi door eindgebruiker.
7. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.
8. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (maximaal 10 km per uur) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
9. Voordat je gaat fietsen, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel deugdelijk vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze deugdelijk vast zitten.
10. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
11. De leeftijd/gewicht van het kind dat in het Maxi Cosi wordt vervoerd is maximaal 0 tot 13 kg.
12. Koppel het Connect Kid Maxi Cosi nooit aan of af op het Connect Offroadwiel met het kind in het Maxi Cosi.
13. De gordel van het Maxi Cosi dient altijd vast te zijn, wanneer het kind zich in het Maxi Cosi bevindt of bij het rijden; evenals de riempjes van de voetensteuntjes.
14. Het is verboden om de Connect Kid Maxi Cosi te gebruiken onder invloed van alcohol/drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
15. Zorg bij het wheelen dat u goed bent uitgerust (mobiele telefoon).
16. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
17. Bij gebruik van de Connect Kid Maxi Cosi in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
18. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
19. Rolstoelers dragen een signaleringsvestje.

20. Ter bescherming van het hoofd wordt een helm gedragen, wanneer er offroad wordt gegaan.
21. Pas uw snelheid aan, aan de omstandigheden. Denk aan drukke wegen, slechte wegen en wegen langs waterpartijen.
22. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de dealer/ Roam specialist. De Roamspecialist als ook de dealer zijn verplicht de handleiding op te volgen en de aanbevolen gereedschappen toe te passen.
23. Er mogen geen wijzigingen aan het Connect Kid Maxi Cosi worden aangebracht.
24. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan het Connect Kid Maxi Cosi is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.

## ***Aan- en afkoppelen van de Connect Kid Maxi Cosi***

### **AANKOPPELEN**

Nooit Het Connect Offroadwiel aan- of afkoppelen met het Maxi Cosi er op bevestigd.

Koppel het Connect Offroadwiel aan zonder het Maxi Cosi. Dit gaat zeer eenvoudig.

U zet allereerst de rolstoel op de rem; dan zet u de hendel van de connector op de Connect Offroadwiel dicht (omlaag) en schuif nu het Connectwiel met het lagerhouder zover mogelijk in de adapter van uw rolstoel.

Nu moet u de hendel van de connector op het Connectwiel openen (omhoog), zodat de beugel over het lipje van de adapter valt, daarna zet u de handel weer dicht. Nu is het Connectwiel aangekoppeld.

Plaats nu het Maxi Cosi op het Connect Offroadwiel ( let op: zonder kind). Als het Maxi Cosi op de juiste wijze is bevestigd kan het kind er in worden gezet. Dan de gordel direct vastmaken.

De rolstoel is nu rijklaar, dus de rem van de rolstoel en u kunt gaan rijden.

Let op: de leeftijd/het gewicht van de baby/kind dat in het Maxi Cosi mag worden vervoerd is maximaal tussen de 0 en 13 kg.

### **AFKOPPELEN**

U zet de rem op de rolstoel en maakt de gordel van de Maxi Cosi los. Vervolgens haalt u het kind uit het Maxi Cosi.

Dan wordt het Maxi Cosi van het Connect Off Roadwiel afgekoppeld. Daarna volgt het afkoppelen van het Offroadwiel. Dit gaat ook weer zeer eenvoudig. Bij voorkeur pakt u het frame van het Offroadwiel vast, daarna opent u met uw andere hand de connector en houdt de beugel van de klem omhoog. Nu kunt u de hendel van de connector weer dicht doen zodat de beugel op het lipje komt te liggen. Vervolgens het Offroadwiel langzaam uit de adapter schuiven en wegzetten.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: [www.:Roam.nl](http://www.:Roam.nl)



**GARANTIEPERIODE:**

U heeft 1 jaar garantie op de onderdelen en 5 jaar op het frame.



## **Onderhoudsbeurten en uw vakman**

Vitale delen zoals kabels, spaken etc krijgen in de aanlooperperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, is een grote jaarbeurt noodzakelijk. Uw vakman heeft niet alleen het gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren, maar zijn handen, ogen en oren zijn eveneens in staat om kleine onvolkomenheden tijdig te bespeuren. Vóór het invallen van de winter of vóór een vakantietrektocht, adviseren wij u de fiets na te laten kijken. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw dealer.

## **Onderhoud Connect Kid Maxi Cosi**

1. De Connect Kid Maxi Cosi schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Connect Kid Maxi Cosi schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Connect Kid Maxi Cosi niet afsputten met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Connect Kid Maxi Cosi.
5. Aluminium en chroomdelen insmeren met een zuurvrije vaseline of speciaal vet (vraag uw dealer).
6. De Connect Kid Maxi Cosi droog opslaan.

## **Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist**

Voor de bescheiden werkzaamheden volstaat een eenvoudige set gereedschap. U bent al een flink stuk op weg met een setje steek- of dopsleutels (8 t/m 15), inbussleutels, schroevendraaier, combinatietang, een busje rijwielolie en uiteraard een banden-reparatieset. Zorgt u er bij vervanging in ieder geval voor dat originele of gelijkwaardige onderdelen worden gemonteerd voor een betere werking en omdat in sommige gevallen anders de garantie vervalft. Vraag uw Roam-dealer om advies!

## Checklist

Regelmatig controleren:

1. Zitten alle bouten en moeren goed vast?
2. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
3. Zijn de banden op spanning (banden druk staat op de zijkant van de band)?
4. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
5. Werkt de snelsluiting naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).

**Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.**

## ***Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/Roam Specialist***

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*

## **Garantie**

Roam geeft 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage.

Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

## **Contact**

**Roam Special Cycles B.V.**

**Haarstraat 19b**

**5324 AM Ammerzoden**

**Tel.: 073-599 7042**

**E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)**

**Internet: [www.roam.nl](http://www.roam.nl)**