

Handleiding Connect Offroad
Udinummer 870261760Coo97899975321YL



Kenmerken Connect Offroad

- De Connect Offroad is de ideale oplossing voor de rolstoel als u de weg af gaat en voor slechte wegen of in de winter door de sneeuw.
- Zeer eenvoudig aan- en afkoppelbaar d.m.v. een uitgekiende en bedrijfszekere verbinding.
- Bij vouwrolstoel: adapter altijd afneembaar.
- Connect Offroad is vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal.
- Gewicht: ± 5 kg.
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar.
- Levertijd: 5 werkdagen na ontvangst van de rolstoel bij Roam. Montage direct op afspraak is ook mogelijk.



Inleiding

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat.

De Roam Connect Offroad is de ideale oplossing voor de rolstoelgebruiker wanneer gebruik wordt gemaakt van slechte wegen en in de winterperiode wanneer de weg bedekt is met sneeuw.

Roam is in 1987 opgericht door Theo de Rouw, die op eigen initiatief - in de avonduren - startte met ondernemen. Zijn doelstelling was: de onafhankelijkheid van de beperkte mens. Deze doelstelling had tot gevolg dat drie jaar nadien de eenmanszaak uitgreide tot een fulltime job.

Met steeds dezelfde doelstelling voor ogen werd in 1997 de onderneming omgezet in een V.O.F. en volgt samenwerking met Johanna de Rouw en later ook met Johan de Rouw. De doelstelling van het onafhankelijk zijn van de beperkte mens is door de jaren heen vastgehouden en blijft ook voor de toekomst voor Roam actueel.

Inmiddels heeft Roam 12 werknemers. Het bedrijf is NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 13485 gecertificeerd en werkt volgens het Nationale Hulpmiddelen Keurmerk. Deze certificaten verzekeren u ervan dat Roam op alle gebied kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.

In 2003 is Roam door de Kamer van Koophandel uitgeroepen tot de creatiefste ondernemer van het jaar (het certificaat hiervoor is uitgereikt door de Kamer van Koophandel).

Inmiddels geniet de Roam aanpak internationale erkenning.

Welkom bij het Roam-team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Connect Offroad. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Connect Offroad rijklaar gemaakt.

Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikers-handleiding.

Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Connect Offroad beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding.

Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Connect Offroad voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Connect Offroad is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw dealer of de fabrikant.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Connect Offroad.

ROAM Special Cycles B.V.
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

1 november 2021

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Welkom bij het Roam Team 3

Inhoudsopgave 4

Controle en Levering 5

Geboden en waarschuwingen 6/7/8

Aan en afkoppelen van de Connect off Road 8

Onderhoudsbeurten en uw vakman 9

Onderhoud 9

Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist 9

Checklist 10

Aanhaalmomenten 10

Garantie 11

EU Conformiteitsverklaring 12

Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transport-schade wordt geconstateerd, geef dit dan door aan uw dealer. Roam vertrouwt erop dat de Connect Offroad aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel fietsplezier.

Belangrijk

Bij aflevering van uw Connect Offroad zijn alle op de bijgeleverde CD beschreven onderdelen goed en/of afgesteld op uw wensen. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. U kunt dit het best laten verzorgen door uw dealer/Roam-Specialist. Maak hiervoor een afspraak bij uw dealer.

Geboden en Waarschuwingen

Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!

Algemeen

1. Bij aanschaf van de Connect Offroad dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. De gebruiker van de Connect Offroad dient in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren en niet te worden beperkt in een zittende positie.
4. Het gehoor- en gezichtsvermogen van de gebruiker dient geschikt te zijn voor het gebruik van de Connect Offroad.

Geen wijzigingen aan de Connect Offroad

1. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Offroad worden aangebracht.
2. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Offroad is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
3. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik of onjuiste informatie voor de toepassing van de Connect Offroad en de hieruit voortvloeiende schade, onveilige situaties/handelingen, ongelukken of incidenten.
4. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Offroad worden aangebracht. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Offroad is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
5. De snelheid van onze producten mag op geen enkele wijze worden opgevoerd of veranderd. Bij het wijzigen van ons product is de producent/fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

De gebruiker

1. Gebruiker dient de handleiding goed te lezen en begrijpen.
2. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
3. Het is verboden om de Connect Offroad te gebruiken onder invloed van alcohol/drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
4. Indien gebruiker zodanig beperkt is dat hij/zij gezichts-/gehoorproblemen heeft en/of de handleiding niet kan lezen en begrijpen, zijn ouders/verzorgers/begeleiders verantwoordelijk voor de toepassing van de handleiding en het gebruik van de Connect Offroad door eindgebruiker.
5. Voordat je gaat fietsen, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel deugdelijk vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze deugdelijk vast zitten.
6. De Connect Offroad is persoonsgebonden
7. Zorg bij het wheelen dat u goed bent uitgerust (mobiele telefoon).
8. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
9. Bij gebruik van de Connect Offroad in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
10. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
11. Rolstoelers dragen een signaleringsvestje.
12. Voor het offroad gaan, dient een helm te worden gedragen.

Regelgeving

1. Houd u aan de Fietswet welke geldt in Nederland.
2. Houd u aan de Fietswet die geldt in het buitenland (www.Fietsbond.nl) en past u aan, aan de omstandigheden.
3. Kijk voor meerdere informatie ook naar de website van ANWB.nl
4. Kijk voor regelgeving van de overheid op de website www.overheid.nl.

Rijden met de Connect Offroad

5. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.
6. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (afhankelijk van de weg en de lichamelijke mogelijkheden) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
7. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de dealer/ Roam specialist. De Roamspecialist als ook de dealer zijn verplicht de handleiding op te volgen en de aanbevolen gereedschappen toe te passen.
8. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Offroad worden aangebracht.
9. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Offroad is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
10. Bij wegen waar extra aandacht is vereist zoals wegen: met obstakels, langs waterwegen, voorzien van verhogingen, spooroverwegen, tramrails of voetgangersoversteekplaats en of rijden langs drukke wegen etc, dient stapvoets te worden gereden.
11. Er dient altijd met gepaste snelheid te worden gereden, afhankelijk van de omstandigheden.
12. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
13. De snelheid van onze producten mag op geen enkele wijze worden opgevoerd of veranderd. Bij het wijzigen van ons product is de producent/fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Hellingen en remmen

1. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor gebruiker en passagiers van de Runner met betrekking tot het nemen van hellingen.
2. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen heet lopen en de motor kan overbelast raken zodat er defecten optreden.
3. Het voorgaande punt met betrekking tot hellingen geldt ook voor afdalingen.
4. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
5. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.

Bochten

1. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (afhankelijk van de weg en lichamelijke mogelijkheden van de gebruiker) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.

Aan- en afkoppelen van de Connect Offroad

AANKOPPELEN

Het aankoppelen van de Connect Offroad onder uw rolstoel gaat zeer eenvoudig. U zet allereerst de rolstoel op de rem; dan zet u de hendel van de connector op de Connect Offroad dicht (omlaag) en schuif nu de Connect off Road met het lagerhouder zover mogelijk in de adapter van uw rolstoel.

Nu moet u de hendel van de connector op de Connect Offroad openen (omhoog), zodat de beugel over het lipje van de adapter valt, daarna zet u de handel weer dicht. Nu is de Connect Offroad aangekoppeld. Zet de rolstoel van de rem en u kunt gaan rijden.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl

AFKOPPELEN

Het afkoppelen van de Connect Offroad gaat ook heel eenvoudig. Zet eerst de rolstoel op de rem, dan moet u de Connect Offroad tegenhouden, bij voorkeur het stuur vastpakken, daarna met uw andere hand de connector openen en de beugel van de klem omhoog houden. Nu kunt u de hendel van de connector weer dicht doen zodat de beugel op het lipje komt te liggen. Vervolgens de Connect Offroad langzaam uit de adapter schuiven en wegzetten.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl

GARANTIEPERIODE:

U heeft 1 jaar garantie op de onderdelen en 5 jaar op het frame.

Onderhoudsbeurten en uw vakman

Vitale delen zoals kabels, spaken etc krijgen in de aanlooperperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, is een grote jaarbeurt (1xper jaar) noodzakelijk. Uw vakman heeft niet alleen het gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren, maar zijn handen, ogen en oren zijn eveneens in staat om kleine onvolkomenheden tijdig te bespeuren. Vóór het invallen van de winter of vóór een vakantietrektocht, adviseren wij u de fiets na te laten kijken. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw dealer.

Onderhoud Connect Offroad

1. De Connect Offroad schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Connect Offroad schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Connect Offroad niet afsprengen met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Connect Offroad.
5. Aluminium en chroomdelen insmeren met een zuurvrije vaseline of speciaal vet (vraag uw dealer).
6. De Connect Offroad droog opslaan.

Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist

Voor de bescheiden werkzaamheden volstaat een eenvoudige set gereedschap. U bent al een flink stuk op weg met een setje steek- of dopsleutels (8 t/m 15), inbussleutels, schroevendraaier, combinatietang, een busje rijwielolie en uiteraard een banden-reparatieset. Zorgt u er bij vervanging in ieder geval voor dat originele of gelijkwaardige onderdelen worden gemonteerd voor een betere werking en omdat in sommige gevallen anders de garantie vervalft. Vraag uw Roam-dealer om advies!

Checklist

Regelmatig controleren:

1. Zitten alle bouten en moeren goed vast?
2. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
3. Zijn de banden op spanning (banden druk staat op de zijkant van de band)?
4. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
5. Werkt de snelsluiting naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).

Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.

Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/Roam Specialist

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafsmoeren voorwielen 20-27 Nm*

Garantie

Roam geeft 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage.

Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

Contact

ROAM Special Cycles B.V.
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (EU CONFORMITY DECLARATION)

Roam Special Cycles
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
E-mail: info@**roam**.nl.

SRN (Single Registration Number): APP000006468

Verklaart dat ondervermeld Roam Product:
Declares that the below stated Roam Product:

Product: (Mention the product)
Connect Offroad

CE Markering: (CE Marking)

CE

Omschrijving Product:
(Describe the product)

- 1. een actief hulpmiddel dat verlichting, verbetering of ondersteuning geeft van lichamelijke immobiliteit handicaps of beperkingen.**
 - 2. het verruimen/verbeteren van het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren.**
-
- 1. an active device that provides relief, improvement or support for physical immobility, disabilities or limitations.**
 - 2. expanding/improving independent functioning as much as possible.**

Udi-nummer (Unique identification number): **870261760Coo97899975321YL**

Risicoclassificatie**1** (conform de classificatie MDR 2017/745 EU).

Risk classification **1**: (according classification MDR 2017745 EU).

Voldoet aan de volgende (wettelijke)Regelgeving:

Comply with the below stated European regulation.

- **MDR (Medical Device Regulation)(2017/745/ EU)**
- **Machinerichtlijn(2006/42/EG) - Machinery Directive (X)**
- **EMC richtlijn(2014/30/EU) - Electric Magnetic Compatability Directive(X)**
- **Laagspanningsrichtlijn(2014/35/EU)- Low voltage Directive (X)**

Datum (Date): **1 November 2021**

Handtekening (Signature):

Roam Special Cycles
Johan de Rouw, Managing Director/JDR

Note: (X) niet toepasbaar/not applicable