

Handleiding Connect Offroad (Family)
Udinummer 870261760Coo97899975321YL



Kenmerken Connect Offroad

- De Connect Offroad is de ideale oplossing voor de rolstoel als u zich verplaatst op onverharde wegen .
- Zeer eenvoudig aan- en afkoppelbaar d.m.v. een rolssysteem.
- Connect Offroad is vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal.
- Gewicht: ± 5 kg.
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 7 jaar.

Kenmerken Connect Offroad Family

- De Connect Offroad Family is de ideale oplossing voor de rolstoel als u zich verplaatst op onverharde wegen.
- Meerdere opties zijn mogelijk zoals een keuze voor de Maxi Cosi of de Yepp Thule Mini
- 2 x een parkeerrem
- 12 KG Lengte • 56 cm, Breedte 55 cm Hoogte 62 cm
- Kleur: zwart
- De connectorstang compleet en het stuur zijn afneembaar
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 7 jaar.



ROAM Carrier Solutions B.V.
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl

6 december 2024



Inleiding

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat.

Geen enkele inspanning hoeft te worden geleverd, want de elektrische ondersteuning zorgt ervoor dat u geheel ontspannen en fit op uw bestemming aankomt.

Het bedrijf is NEN-EN-ISO 13485 gecertificeerd en werkt volgens het Nationale Hulpmiddelen Keurmerk. Deze certificaten verzekeren u ervan dat Roam op alle gebieden kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.



Welkom bij het Roam Team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Connect Offroad (Family). Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Connect Offroad (Family) rijklaar gemaakt. Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de Connect Offroad dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikershandleiding. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) het geen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Connect Offroad (Family) beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding. Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Connect Offroad (Family) voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Connect Offroad (Family) is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw Roam dealer.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Connect Offroad (Family).

ROAM Carrier Solutions B.V.
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl



Inhoudsopgave

Inleiding	2
Welkom bij het Roam Team	3
Inhoudsopgave	4
Controle en Levering	5
Geboden en waarschuwingen	6
Scherp afstellen van de rolstoel	9
Hellingen en remmen	8
Aan- en afkoppelen van de Connect Offroad	9
Onderhoudsbeurten en uw Roam dealer	10
Onderhoud Connect Offroad (Family)	10
Gereedschap bestemd voor Roam dealer	10
Checklist	11
Aanhaalmomenten bestemd voor Roam dealer	11
Garantieperiode	12
EU Verklaring	14



Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transport-schade wordt geconstateerd, geef dit dan (binnen 24 uur) door aan uw Roam dealer, ondersteund met foto's. Roam vertrouwt erop dat de Connect Offroad (Family) aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel plezier met uw product.

Belangrijk

Voor de aflevering van uw Connect Offroad (Family) zijn alle controlepunten d.m.v. een checklist gecontroleerd. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. Wij adviseren dit uit te laten voeren door uw Roam dealer. Maak hiervoor een afspraak bij uw Roam dealer.

Geboden en Waarschuwingen

Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!

Algemeen

1. Bij aanschaf van de Connect Offroad (Family) dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. Voordat u gebruik maakt van de Connect Offroad (Family), altijd controleren of de adapter onder de rolstoel naar behoren vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze naar behoren vast zitten.
4. De gebruiker van de Connect Offroad (Family) dient in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren en niet te worden beperkt in een zittende positie.

Geen wijzigingen aan de Connect Offroad (Family)

1. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik of onjuiste informatie voor de toepassing van de Connect Offroad (Family) en de hieruit voortvloeiende schade, onveilige situaties/handleidingen, ongelukken of incidenten.
2. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Offroad (Family) worden aangebracht.
3. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Offroad is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.

De gebruiker

1. De gebruiker dient de Connect Offroad (Family) goed te kunnen bedienen.
2. Het gehoor- en gezichtsvermogen van de bestuurder dient geschikt te zijn voor het gebruik van de Connect Offroad (Family).
3. Gebruiker dient de handleiding goed te lezen en begrijpen.
4. Indien gebruiker zodanig beperkt is dat hij/zij gezichts-/gehoorproblemen heeft en/of de handleiding niet kan lezen en begrijpen, zijn ouders/verzorgers/begeleiders verantwoordelijk voor de toepassing van de handleiding en het gebruik van de Connect Offroad (Family) door eindgebruiker.
5. De Connect Offroad (Family) is persoonsgebonden. Alleen de rolstoelgebruiker zelf, is toegestaan de Connect Offroad (Family) te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
6. Het is verboden dat onbevoegden de Connect Offroad (Family) gebruiken.
7. Het is verboden om de Connect Offroad (Family) te gebruiken onder invloed van alcohol/drugs of geest beïnvloedende medicijnen.

Rijden met de Connect Offroad (Family)

1. Voordat je gaat rijden, altijd controleren of de adapter onder de rolstoel naar behoren vastzit. Bij afneembare adapters moeten de sterknoppen of snelsluitingen nagelopen worden om te bezien of ze naar behoren vast zitten.
2. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.
3. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (afhankelijk van de weg en de lichamelijke mogelijkheden) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
4. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de dealer/ Roam specialist. De Roamspecialist als ook de dealer zijn verplicht de handleiding op te volgen en de aanbevolen gereedschappen toe te passen.
5. Bij wegen waar extra aandacht is vereist zoals wegen: met obstakels, langs waterwegen, voorzien van verhogingen, spooroverwegen, tramrails of voetgangersoversteekplaats en of rijden langs drukke wegen etc, dient stapvoets te worden gereden.
6. Er dient altijd met gepaste snelheid te worden gereden, afhankelijk van de omstandigheden.
7. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
8. Zorg bij het rijden dat u goed bent uitgerust, door het nummer van uw Roam dealer in uw mobiele telefoon bij de hand te houden.
9. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
10. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
11. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de Roam dealer.

Connect Offroad Family Maxi Cosi en Thule Yepp Mini.

1. Wanneer de Offroad Family gebruikt wordt, dienen de 2 achterwielen op de parkeerrem worden gezet.
2. Gebruik ten alle tijden de riem van zowel de Maxi Cosi als de Thule Yepp Mini.
3. Voordat het kind in de Thule Yepp Mini wordt geplaatst, dient het Thule zitje vooraf op de Connect Offroad Family te worden geplaatst.
4. Voordat het Thule zitje wordt losgekoppeld, dient het kind uit het kinderzitje te worden gehaald.

Hellingen en remmen

1. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor gebruiker en passagiers van de Runner met betrekking tot het nemen van hellingen.
2. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen heet lopen en de motor kan overbelast raken zodat er defecten optreden.
3. Het voorgaande punt met betrekking tot hellingen geldt ook voor afdalingen.
4. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
5. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.

Bochten

1. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (afhankelijk van de weg en lichamelijke mogelijkheden van de gebruiker) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.

Aan- en afkoppelen van de Connect Offroad

AANKOPPELEN

Het aankoppelen van de Connect Offroad onder uw rolstoel gaat zeer eenvoudig. U zet allereerst de rolstoel op de rem; dan zet u de hendel van de connector op de Connect Offroad (Family) dicht (omlaag) en schuif nu de Connect offroad (Family) met het lagerhouder zover mogelijk in de adapter van uw rolstoel.

Nu moet u de hendel van de connector op de Connect Offroad (Family) openen (omhoog), zodat de beugel over het lipje van de adapter valt, daarna zet u de hendel weer dicht. Nu is de Connect Offroad (Family) aangekoppeld. Zet de rolstoel van de rem en u kunt gaan rijden.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl

AFKOPPELEN

Het afkoppelen van de Connect Offroad (Family) gaat ook heel eenvoudig. Zet eerst de rolstoel op de rem, dan moet u de Connect Offroad (Family) tegenhouden, bij voorkeur het stuur vastpakken, daarna met uw andere hand de connector openen en de beugel van de klem omhoog houden. Nu kunt u de hendel van de connector weer dicht doen zodat de beugel op het lipje komt te liggen. Vervolgens de Connect Offroad langzaam uit de adapter schuiven en wegzetten.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: www.:Roam.nl



Onderhoudsbeurten en uw vakman

Vitale delen zoals kabels, spaken en remmen krijgen in de aanloopperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, wordt een jaarlijkse onderhoudsbeurt geadviseerd (noodzakelijk). Uw Roam dealer heeft het juiste gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw Roam dealer.

Onderhoud Connect Offroad (Family)

1. De Connect Offroad (Family) schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Connect Offroad (Family) schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Connect Offroad (Family) niet afsputten met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Connect Offroad.
5. De Connect Offroad (Family) droog stallen.

Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist

De monteur van uw Roam dealer beschikt over het juiste gereedschap om aan uw E-Bike te kunnen werken. Originele Roam onderdelen dienen gebruikt te worden bij vervanging. Deze kan uw Roam dealer bij de Roam fabrikant in Hedel bestellen. Vraag uw Roam dealer om advies!



Checklist

Regelmatig controleren:

1. Zitten alle bouten en moeren goed vast?
2. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
3. Zijn de banden op spanning (advies bandendruk tussen 1,5 – 2,0 bar)?
4. Werkt / werken de snelsluiting(en) naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).

Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.

Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/Roam Specialist

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*



Garantieperiode

U heeft 12 maanden garantie op de onderdelen en 7 jaar op het frame.

Garantie

Roam geeft 7 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage.

Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

Contact

ROAM Carrier Solutions B.V.
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
Tel.nr. 073-5997042
E-mail: info@roam.nl
Internet: www.roam.nl



EU-CONFORMITEITSVERKLARING (EU CONFORMITY DECLARATION)

Roam Carrier Solutions bv
Buitenkamp 20
5321KB Hedel
E-mail: info@roam.nl.

SRN (Single Registration Number): APP000006468

Verklaart dat ondervermeld Roam Product:
Declares that the below stated Roam Product:

Product: (Mention the product)
Connect Offroad

CE Markering: (CE Marking)
CE

Omschrijving Product:
(Describe the product)

- 1. een actief hulpmiddel dat verlichting, verbetering of ondersteuning geeft van lichamelijke immobiliteit handicaps of beperkingen.**
 - 2. het verruimen/verbeteren van het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren.**
-
- 1. an active device that provides relief, improvement or support for physical immobility, disabilities or limitations.**
 - 2. expanding/improving independent functioning as much as possible.**

Udi-nummer (Unique identification number): **870261760Coo97899975321YL**
Risicoclassificatie¹ (conform de classificatie MDR 2017/745 EU).
Risk classification **1**: (according classification MDR 2017745 EU).

Voldoet aan de volgende (wettelijke)Regelgeving:
Comply with the below stated European regulation.

- **MDR (Medical Device Regulation)(2017/745/ EU)**
- **Machinerichtlijn(2006/42/EG) - Machinery Directive (X)**
- **EMC richtlijn(2014/30/EU) - Electric Magnetic Compatability Directive(X)**
- **Laagspanningsrichtlijn(2014/35/EU)- Low voltage Directive (X)**
- **NEN-EN 12485, where applicable**
- **NEN-EN 12184**

Datum (Date): **1 November 2021**

Handtekening (Signature):
Roam Special Cycles
Johan de Rouw, Managing Director/JDR

Note: (X) niet toepasbaar/not applicable



Etiketgegevens

Artikel: Roam Connect Offroad



Artikelnummer: 9789997

Beschrijving: Medisch Mobiel en Actief Hulpmiddel

Udinummer: 870261760Coo97899975321YL

Risico klasse: 1

Fabrikant: Roam Carrier Solutions

Adres: Buitenkamp 20

5321KB Hedel

Nederland

T.: 073-5997042

www:Roam.nl

E.: info@roam.nl

Etiketgegevens

Artikel: Roam Connect Offroad Family



Artikelnummer: 101726

Beschrijving: Medisch Mobiel en Actief Hulpmiddel

Udinummer: 870261760Coo97899975321YL

Risico klasse: 1

Fabrikant: Roam Carrier Solutions

Adres: Buitenkamp 20

5321KB Hedel

Nederland

T.: 073-5997042

www:Roam.nl

E.: info@roam.nl