


**Handleiding Connect Aankoppelstang**  
**Udinummer870261760Cos97020705321KB**

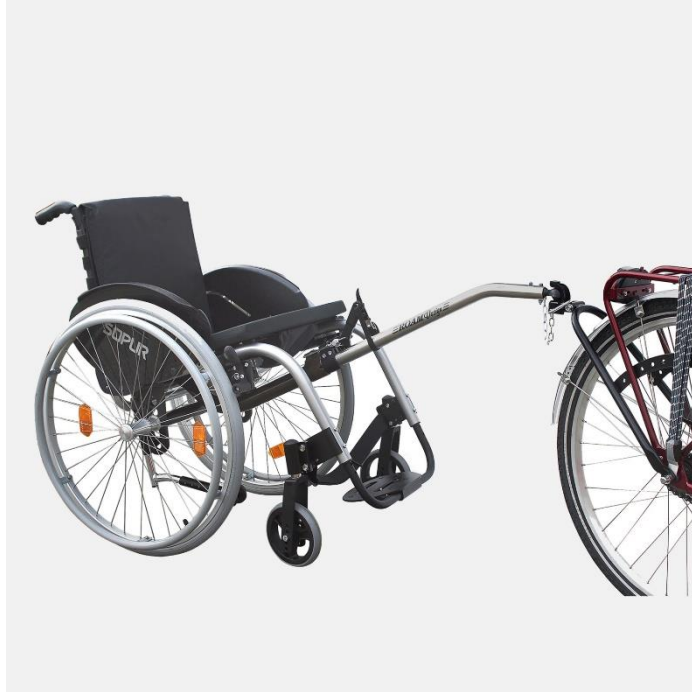

**Kenmerken Connect Aankoppelstang**

- Uitsluitend geschikt voor vervoer rolstoel zonder persoon.
- Wil je een persoon mee vervoeren is de Connect aanhanger een mooie oplossing.
- De aankoppelstang is mogelijk voor iedere rolstoel.
- Maximaal totaalgewicht achter de fiets: 100 kg (incl. rolstoel).
- Uiterst eenvoudig aan- en afkoppelbaar.
- Dubbele beveiliging van de bevestiging.
- Bij vouwrolstoel: adapter afneembaar.
- Pakkendrager van de fiets blijft bruikbaar.
- Aankoppelstang is van roestvrij staal.
- Gewicht: ± 4 kg.
- Garantie: onderdelen 1 jaar / frame 5 jaar.
- Levertijd: 5 werkdagen na ontvangst van de rolstoel bij Roam. Montage direct op afspraak is ook mogelijk.

ROAM Special Cycles B.V.  
Buitenkamp 20  
5321KB Hedel  
Tel.nr. 073-5997042  
E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)  
Internet: [www.roam.nl](http://www.roam.nl)  
1 december 2023



## Inleiding

Roam is fabrikant van unieke en speciale "fietsen", waarbij de zelfstandigheid van de gebruiker voorop staat.

De Roam Connect Aankoppelstang kan aan elke fiets worden gekoppeld en de aankoppelstang kan een rolstoel die breder is dan 58 cm tot een maximum van 85 cm vervoeren.

Roam is in 1987 opgericht door Theo de Rouw, die op eigen initiatief - in de avonduren - startte met ondernemen. Zijn doelstelling was: de onafhankelijkheid van de beperkte mens. Deze doelstelling had tot gevolg dat drie jaar nadien de eenmanszaak uitgroeide tot een fulltime job.

Met steeds dezelfde doelstelling voor ogen werd in 1997 de onderneming omgezet in een V.O.F. en volgt samenwerking met Johanna de Rouw en later ook met Johan de Rouw. De doelstelling van het onafhankelijk zijn van de beperkte mens is door de jaren heen vastgehouden en blijft ook voor de toekomst voor Roam actueel.

Inmiddels heeft Roam 12 werknemers. Het bedrijf is NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 13485 gecertificeerd en werkt volgens het Nationale Hulpmiddelen Keurmerk. Deze certificaten verzekeren u ervan dat Roam op alle gebied kwaliteit levert, vanaf de ontwikkeling en ontwerp tot en met de aflevering en nazorg. Roam blijft met u als gebruiker meedenken. De Roam producten worden continue verbeterd en aangepast op eisen, wensen en behoeften van u als gebruiker.

In 2003 is Roam door de Kamer van Koophandel uitgeroepen tot de creatiefste ondernemer van het jaar (het certificaat hiervoor is uitgereikt door de Kamer van Koophandel). Inmiddels geniet de Roam aanpak internationale erkenning.



## Welkom bij het Roam-team

Wij danken u voor het aanschaffen van ons product, de Connect Aankoppelstang. Met zeer veel zorg heeft de Roam vakman uw Connect Aankoppelstang rijklaar gemaakt.

Het overhandigen van de gebruikershandleiding heeft inmiddels plaatsgevonden. U vindt hierin beschreven op welke wijze er met de Connect Aankoppelstang dient te worden omgegaan. Let wel, de voltallige handleiding, dient te worden opgevolgd.

Roam is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik, het negeren van de geboden/ waarschuwingen en het niet nakomen van de gebruikers-handleiding.

Bij onjuist of oneigenlijk gebruik of het niet toepassen van de handleiding kan Roam niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, u dient als gebruiker (gebod) hetgeen in de gebruikershandleiding is beschreven, op te volgen.

Het avontuur van vrijheid en een stap naar onafhankelijkheid kan met de Connect Aankoppelstang beginnen en dat betekent vooral eerst kennis maken met dit mooie product; volg hierbij de gebruikershandleiding.

Neem rustig de tijd om te ervaren wat de Connect Aankoppelstang voor u als waardevol en onafhankelijk individu kan betekenen.

De Connect Aankoppelstang is gemaakt om u zo goed mogelijk te dienen bij uw wensen, behoeften en gebruik en daarbij spelen soms bescheiden millimeters een belangrijke rol. Ook voor uw en andermans veiligheid! Schroom niet om uw bevindingen kenbaar te maken bij uw dealer of de fabrikant.

Wij wensen u veel plezier met de Roam Connect Aankoppelstang.

ROAM Special Cycles B.V.  
Buitenkamp 20  
5321KB Hedel  
Tel.nr. 073-5997042  
E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)  
Internet: [www.roam.nl](http://www.roam.nl)



## **Inhoudsopgave**

***Inleiding 2***

***Welkom bij het Roam Team 3***

***Inhoudsopgave 4***

***Controle en Levering 5***

***Geboden en waarschuwingen 6/7/8***

***Aan en afkoppelen van de Connect Aankoppelstang 8/9***

***Remmen 10***

***Garantieperiode 10***

***Onderhoudsbeurten en uw vakman 11***

***Onderhoud 11***

***Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist 11***

***Checklist 12***

***Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/***

***Roam Specialist 12***

***Garantie 13***

***Contact 13***

***EU Verklaring 14***



## Controle van de levering

Controleer of de levering overeenkomt met de bon. Indien er bij aflevering transport-schade wordt geconstateerd, geef dit dan door aan uw dealer. Roam vertrouwt erop dat de Connect Aankoppelstang aan uw verwachtingen voldoet en wenst u veel succes en vooral veel fietsplezier.

## Belangrijk

*Bij aflevering van uw Connect Aankoppelstang zijn alle op de bijgeleverde CD beschreven onderdelen goed en/of afgesteld op uw wensen. Bepaalde onderdelen moeten na verloop van tijd opnieuw worden afgesteld. U kunt dit het best laten verzorgen door uw dealer/Roam-Specialist. Maak hiervoor een afspraak bij uw dealer.*



**De fietser dient rekening te houden met de breedte van het wegdek. De totale breedte van de rolstoel die door de Connect Aankoppelstang kan worden vervoerd is 85 cm. Let dus op bij het nemen van bochten en eventueel paaltjes die zich in het wegdek bevinden. Bij twijfel stopt de fietser en loopt naast de fiets door de bocht en tussen de paaltjes van het wegdek door.**

## Geboden en Waarschuwingen

**Neem de onderstaande geboden en waarschuwingen altijd in acht!**

### Algemeen

1. Bij aanschaf van de Connect Aankoppelstang dient de dealer de juiste gegevens te verschaffen aan ROAM Special Cycles BV over het gebruik en de toepassing.
2. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten, schade, onveilige handelingen of situaties, ongelukken of incidenten door onjuist gebruik, onjuiste informatie of onjuist onderhoud of reparatie.
3. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.

### Geen wijzigingen aan de Connect Aankoppelstang

1. Roam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist gebruik of onjuiste informatie voor de toepassing van de Connect Aankoppelstang en de hieruit voortvloeiende schade, onveilige situaties/handelingen, ongelukken of incidenten.
2. Er mogen geen wijzigingen aan de Connect Aankoppelstang worden aangebracht.
3. Roam is niet verantwoordelijk voor schade welke aan de Connect Aankoppelstang is ontstaan door het aanbrengen van wijzigingen.
4. De snelheid van onze producten mag op geen enkele wijze worden opgevoerd of veranderd. Bij het wijzigen van ons product is de producent/fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

### De gebruiker

1. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor juist gebruik, zoals in deze handleiding is vermeld.
2. De Connect Aankoppelstang is persoonsgebonden. Het is verboden dat onbevoegden de Connect Aankoppelstang gebruiken. Alleen de eigenaar/gebruiker is toegestaan de Connect Aankoppelstang te gebruiken.
3. De rolstoelgebruiker is verplicht een heupgordel te dragen tijdens het gebruik van de Connect Aankoppelstang.
4. De fietser dient rekening te houden met de breedte van het wegdek. De totale breedte van de aanhanger is 85 cm. Let dus op bij het nemen van bochten en eventueel paaltjes die zich in het wegdek bevinden. Bij twijfel stopt de fietser en loopt naast de fiets door de bocht en tussen de paaltjes van het wegdek door.
5. Bescherm uzelf bij langere ritten tegen slechte weersomstandigheden in de winter of overmatige warmte in de zomerperiode.
6. De handen van de rolstoeler dienen tijdens het fietsen binnen de rolstoel te blijven.
7. Rolstoelers dragen een signaleringsvestje.
8. Zorg bij het fietsen dat u goed bent uitgerust (mobiele telefoon).

9. Vermeld het nummer van uw dealer in uw mobiele telefoon.
10. Zorg voor een goede verdere uitrusting zoals: reparatie-set banden, kleine EHBO kit, bidon met drinkwater, enig losgeld en de identiteitskaart.
11. Het is verboden om de Connect Aankoppelstang te gebruiken onder invloed van alcohol/drugs of geest beïnvloedende medicijnen.
12. Controleer voordat u gaat fietsen altijd de remmen (d).

## Regelgeving

1. Houd u aan de Fietswet welke geldt in Nederland.
2. Houd u aan de Fietswet die geldt in het buitenland ([www.Fietsbond.nl](http://www.Fietsbond.nl)) en past u aan, aan de omstandigheden.
3. Kijk voor meerdere informatie ook naar de website van ANWB.nl

## Gebruik van de Connect Aankoppelstang

1. Controleer voordat u gaat fietsen altijd de remmen (de fietser).
2. De bagagedrager van de fiets blijft vrij.
3. Het totale gewicht van de Connect Aankoppelstang is 100 kg.
4. De Connect Aankoppelstang kan alleen worden gebruikt als de rolstoel een parkeerrem heeft.
5. Neem obstakels in het wegdek (drempels) met gepaste snelheid.
6. Bij gebruik van de Connect Aankoppelstang in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
7. Let op dat de Rolstoel juist wordt bevestigd op de aanhanger en wordt vastgemaakt met de bevestigingsgordels.
8. Bij wegen waar extra aandacht is vereist zoals wegen: met obstakels, langs waterwegen, voorzien van verhogingen, spooroverwegen, tramrails of voetgangersoversteekplaats en of rijden langs drukke wegen etc, dient stapvoets te worden gereden.
9. Er dient altijd met gepaste snelheid te worden gereden, afhankelijk van de omstandigheden.
10. Voor onderhoud, instellingen, afstellingen, vervanging van onderdelen en/of reparaties wordt verwezen naar de dealer/ Roam specialist. De Roamspecialist als ook de dealer zijn verplicht de handleiding op te volgen en de aanbevolen gereedschappen toe te passen.

## Hellingen en remmen

1. In een aantal gevallen kan, indien deze handleiding niet juist wordt gevolgd, een gevaarlijke situatie ontstaan voor gebruiker en passagiers van de Connect Aankoppelstang met betrekking tot het nemen van hellingen.
2. Voor hellingen van 5% of meer zijn de remmen niet berekend. Bij hellingen die erg lang of steil zijn, kunnen de remmen heet lopen en de motor kan overbelast raken zodat er defecten optreden.
3. Het voorgaande punt met betrekking tot hellingen geldt ook voor afdalingen.
4. Let op dat bij het afdalen van een helling de snelheid toeneemt.
5. Let op: Bij wegen waar olie, modder, zand of bladeren op het wegdek liggen kan de remweg langer zijn. Dit geldt ook voor een ongelijk wegdek (kuilen/gaten) en winterse omstandigheden.

## Bochten

1. Haakse en scherpe bochten dienen met gepaste snelheid (maximaal 10 km per uur) te worden genomen om kantelgevaar te voorkomen.
2. Bij gebruik van de Connect Aankoppelstang in het donker/duister/schemer of slechte weersomstandigheden, dient verlichting te worden gevoerd.
3. Rolstoelers dragen een signaleringshesje.

## Aan- en afkoppelen van de Connect Aankoppelstang

### AANKOPPELEN

1. Het aankoppelen van de Connect Aankoppelstang gaat zeer eenvoudig.
2. Zet de beide wielen van de aanhanger op de rem. Dit gaat als volgt: C, de rode hevel omhalen. Door de rode hevel 180 graden om te halen staan de wielen op de rem. Dit geldt voor beide wielen.
3. Zet de standaard uit. Deze is aan de achterkant gemonteerd.
4. Haal de koppelstang van de aanhanger af.
5. Rij de rolstoel achteruit op de aanhanger, zover mogelijk tegen de buis aan.
6. Zet de rolstoel op de rem (parkeerrem rolstoel).
7. Maak de heupgordel van de rolstoelgebruiker vast.
8. Haal de achterste gordel van de Connect Aankoppelstang door het frame en span deze aan door de draaiknop vast te draaien.
9. Haal de voorste gordel door het frame en haak deze vast aan het oog dat op de Connect Aankoppelstang aanwezig is.
10. Ratel de gordel vast door de oranje hevel op en neer te halen.
11. Koppel de koppelstang vast aan de Connect Aankoppelstang.
12. Klap de standaard in.
13. Haal de rem van de wielen van de Connect Aankoppelstang.
14. Koppel de koppelstang aan de fiets.
15. Maak de borghaak en de ketting vast aan de koppeling.
16. U bent gereed om te fietsen.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: [www.:Roam.nl](http://www.:Roam.nl)

### AFKOPPELEN

1. Het afkoppelen van de Connect Aankoppelstang gaat ook heel eenvoudig.
2. Haal de borghaak en de ketting los van de koppeling.
3. Koppel de koppelstang los van de fiets.
4. Klap de standaard uit.
5. Zet beide wielen van de Connect Aankoppelstang op de rem. Door de rode hevel 180 graden om te halen staan de wielen op de rem.
6. Koppel de koppelstang los van de Connect Aankoppelstang.
7. Koppel de voorste gordel van de Connect Aankoppelstang los, door de releasehevel in te trekken



8. en de hevel zover mogelijk omhoog te trekken. De gordel kan dan losgehaald worden.
9. De achterste gordel van de Connect Aankoppelstang kan worden losgehaald door het rode heveltje om de halen.
10. Haal de rolstoel van de rem en rij de rolstoel voorzichtig van de Connect Aankoppelstang.
11. Maak de koppelstang los
12. Klap de standaard van de Connect Aankoppelstang in.
13. Zet de rem van de Connect Aankoppelstang en berg deze op een droge plaats.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn, dan verwijzen wij u naar de filmpjes op onze website: [www.:Roam.nl](http://www.:Roam.nl)

## Remmen

Het is van vitaal belang dat u de werking van de remmen van uw Connect Aankoppelstang volledig begrijpt. Indien de remmen niet op de juiste wijze gebruikt worden, kan dit tot schade en ongelukken leiden.

Wanneer de remmen naar het oordeel van gebruiker niet naar behoren functioneren, dient **direct** contact te worden opgenomen met de dealer. De dealer dient eventuele defecten op te lossen. Het is verboden om de Connect Aankoppelstang te gebruiken bij het niet werken van het remsysteem in wat voor vorm dan ook.

Let op:

1. Kom niet in aanraking met de constructie of behuizing van de rem van de Connect Aankoppelstang tijdens het fietsen.
2. Controleer voordat u gaat fietsen altijd de remmen van uw fiets (de fietser).

### **GARANTIEPERIODE:**

U heeft op de onderdelen 1 jaar garantie en 5 jaar op het frame

## Onderhoudsbeurten en uw vakman

Vitale delen zoals kabels, spaken en remmen krijgen in de aanlooperperiode kans om zich te "zetten". Om echter plezierig én veilig te kunnen blijven rijden, is een grote jaarbeurt (1x per jaar) noodzakelijk. Uw vakman heeft niet alleen het gereedschap en de ervaring om verborgen draaiende delen zoals balhoofd en naven te stellen en te smeren, maar zijn handen, ogen en oren zijn eveneens in staat om kleine onvolkomenheden tijdig te bespeuren. Vóór het invallen van de winter of vóór een vakantietrektocht, adviseren wij u de fiets na te laten kijken. Goed onderhoud is ook met betrekking tot de garantie uiterst belangrijk. Maak voor de onderhoudsbeurt een afspraak met uw dealer.

## Onderhoud Connect Aankoppelstang

1. De Connect Aankoppelstang schoonmaken met een droge doek.
2. Bij ernstig vuil de Connect Aankoppelstang schoonmaken met een zachte vochtige spons en nadrogen.
3. De Connect Aankoppelstang niet afsputten met een hoge drukreiniger.
4. Geen chemische schoonmaakmiddelen (chloor/bleek/soda) toepassen bij het schoonmaken van de Connect Aankoppelstang.
5. Aluminium en chroomdelen insmeren met een zuurvrije vaseline of speciaal vet (vraag uw dealer).
6. De Connect Aankoppelstang droog opslaan.

## Gereedschap bestemd voor dealer/Roam Specialist

Voor de bescheiden werkzaamheden volstaat een eenvoudige set gereedschap. U bent al een flink stuk op weg met een setje steek- of dopsleutels (8 t/m 15), inbussleutels, schroevendraaier, combinatietang, een busje rijwielolie en uiteraard een bandenreparatieset. Zorgt u er bij vervanging in ieder geval voor dat originele of gelijkwaardige onderdelen worden gemonteerd voor een betere werking en omdat in sommige gevallen anders de garantie vervalft. Vraag uw Roam-dealer om advies!

## Checklist

Regelmatig controleren:

1. Werken de remmen naar behoren?
2. Staat stuurpen niet hoger dan de veiligheidsmarkering aangeeft?
3. Werken de veiligheidsgordels naar behoren?
4. Is het loopvlak van de banden niet versleten en hebben ze geen zwakke plekken of bobbels?
5. Zijn de banden op spanning (banden druk staat op de zijkant van de band)?
6. Zit de stuurpen en stuurbocht goed vast?
7. Werkt de standaard naar behoren?
8. Is de zijreflectie van de banden schoon en dus goed zichtbaar in het donker?
9. Zitten de handvaten nog goed vast?
10. Werken de snelsluitingen naar behoren? (er mag geen speling op zitten, noch mag de snelsluiting loszitten).

**Bij twijfel, direct contact opnemen met uw dealer.**

## Aanhaalmomenten bestemd voor dealer/ Roam Specialist

Hieronder vindt u een overzicht van aanbevolen aanhaalmomenten. Wij raden u aan de vermelde onderdelen met een momentsleutel aan te draaien op basis van de genoemde waarden. Harder aandraaien van de onderdelen kan tot schade aan uw fiets leiden. Het beste kunt u voor deze handeling uw Roam-dealer om hulp en advies vragen.

- *Stuurplugbout 12-15 Nm*
- *Expanderbout met schuine klos 20-23 Nm*
- *Naafasmoeren voorwielen 20-27 Nm*



## Garantie

Roam geeft 5 jaar garantie op fouten in materiaal en afwerking aan het frame. Alle door Roam vervaardigde en in de handel gebrachte onderdelen en componenten hebben een garantie van 1 jaar. Deze garantie omvat niet: banden- en onderdelenslijtage. Roam zal waar nodig onderdelen repareren of vervangen, mits een officiële Roam-dealer binnen de vastgestelde garantieperiode akkoord is gegaan met terugzending. Roam geeft geen garantie op onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerde montage en/of reparatie door de betreffende eigenaar, verwaarlozing, ongeval of onjuist gebruik.

## Contact

ROAM Special Cycles B.V.  
Buitenkamp 20  
5321KB Hedel  
Tel.nr. 073-5997042  
E-mail: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)  
Internet: [www.roam.nl](http://www.roam.nl)



EU-CONFORMITEITSVERKLARING (EU CONFORMITY DECLARATION)

Roam Special Cycles  
Buitenkamp 20  
5321KB Hedel  
E-mail: info@**roam**.nl.

SRN (Single Registration Number): APP000006468

Verklaart dat ondervermeld Roam Product:  
Declares that the below stated Roam Product:

Product: (Mention the product)  
**Connect aankoppelstang**

CE Markering: (CE Marking)

CE

Omschrijving Product:  
(Describe the product)

1. **een actief hulpmiddel dat verlichting, verbetering of ondersteuning geeft van lichamelijke immobiliteit handicaps of beperkingen.**
  2. **het verruimen/verbeteren van het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren.**
- 
1. **an active device that provides relief, improvement or support for physical immobility, disabilities or limitations.**
  2. **expanding/improving independent functioning as much as possible.**

Udi-nummer (Unique identification number): **870261760Cos9702075321KB**

Risicoklasse: **1** (conform de classificatie MDR 2017/745 EU).

Risk classification **1**: (according classification MDR 2017745 EU).

Voldoet aan de volgende (wettelijke)Regelgeving:

Comply with the below stated European regulation.

- **MDR (Medical Device Regulation)(2017/745/ EU)**
- **Machinerichtlijn(2006/42/EG) - Machinery Directive**
- **EMC richtlijn(2014/30/EU) - Electric Magnetic Compatability Directive**
- **Laagspanningsrichtlijn(2014/35/EU)- Low voltage Directive**

Datum (Date): **1 November 2021**

Handtekening (Signature):

Roam Special Cycles

Johan de Rouw, Managing Director/JDR



Etiketgegevens

Artikel: Roam Connect Aankoppelstang

CE

FRAMENUMMER: 9702070

Beschrijving: Aankoppelstang om de rolstoel te vervoeren

Udinummer: 870261760Coc97023005321XG

Risico klasse: 1

Fabrikant: Roam Special Cycles

Adres: Buitenkamp 20

5321KB Hedel

Nederland

T.: 073-5997042

www:Roam.nl

E.: [info@roam.nl](mailto:info@roam.nl)